

KATEGORIA: **OCHRONA**

Ośłona twarzy – premium

NR ARTYKUŁU: **OH-01-001**

OPIS PRODUKTU:

Ośłona mająca na celu zredukować ryzyko zarażenia przy bliskim kontakcie z klientem. Możliwość otwierania szyby za pomocą dedykowanych uchwytów w górnych narożnikach. Na pasie została umieszczona atestowana gąbka.

SPECYFIKACJA:

- Format szyby: 35x30cm
- Płyta PET 0,5mm o wysokiej przezroczystości + folia ochronna
- Możliwość wymiany szyby
- Guma tkana: 20mm (czarna lub biała*) - prosta regulacja
- Pianka: 180g (szara lub biała*), grubość 1cm
- Do samodzielnego montażu.

CERTYFIKATY I ZGODNOŚCI:

- Atest higieniczny HK/B/0669/01/2015
- Zgodna z zasadą 1935/2004
- Sprężystość PN-EN ISO 8307: 2000 [35]
- Właściwości przy rozciąganiu PN-EN ISO 1798: 2001 [80]
- Odkształcenie przy ściskaniu PN-EN ISO 3386-1: 2000 [3]

DOSTĘPNOŚĆ:

Czas realizacji zleceń na osłony wynosi 2-3 dni robocze.

Ze względu na różny skład płynów dezynfekujących, nie zaleca się dłuższego kontaktu ze środkiem. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni przezroczystych. Płyn należy nakładać w niewielkich ilościach i niezwłocznie usunąć go przy pomocy miękkiego materiału.




Initi Protection™
BEZPIECZNE OTOCZENIE



PRODUCENT:

ondre.pl
poligrafia i reklama

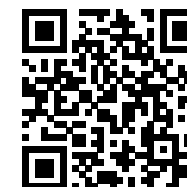

Link do strony: **Initi Protection™**

Potrzebujesz pomocy?

+48 61 670 78 16

poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00


www.initi.pl

Ośłona twarzy – instrukcja

NR ARTYKUŁU: **OH-01-001**


KROK 1:

Przełóż gumkę przez otwory w pasku. Odpowiednio przesuwając ją, możesz wyregulować docelową długość i dopasować do głowy. Powtórz czynność z obu stron czarnego paska.

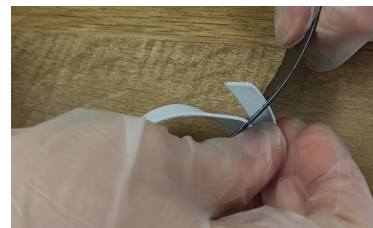

KROK 2:

Zdejmij folię ochronną z szyby - z obu stron. Zależnie od wersji, folia może być biała, przezroczysta lub niebieska.

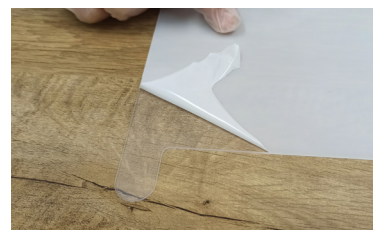

KROK 3:

Zamontuj szybę na śrubach za pomocą wywierconych otworów, które celowo są ciasne, dla lepszej stabilności szyby. Zakręć mocno plastikową nakrętką.

